

APESIN multi

QUICK & EASY


Univerzális fertőtlenítő tisztítóhab

■ Sokoldalú
■ Biztonságos
■ Hatékony

Termék tulajdonságok

- Általános fertőtlenítő-tisztító széles hatásspektrummal, baktériumok, élesztők, vírusok (korlátozott hatásspektrum) és gombák ellen, orvosi, intézményi és nyilvános területeken.
- Az APESIN multi Quick & Easy egy lépésben hatékony fertőtlenítést és tisztítási eredményeket biztosít.
- A koncentrátum minimalizálja a szállítási súlyt, és alacsonyabb leltártkészletet eredményez.
- A hordozható Quick & Easy adagolási rendszer pontos és biztonságos adagolást biztosít.
- Festék és parfüm mentes termék.
- Az összetevők aldehid, fenol, alkohol és klór mentesek, nincs szagterhelés, illata nem kellemetlen.
- Nincs permet az innovatív habosító szórófejek köszönhetően, mely széleskörű felhasználást tesz lehetővé.
- CLP-mentes termék, mely alkalmazása során maximális felhasználói biztonságot nyújt.
- Bőrkompatibilitás dermatológiailag tesztelt.

Felhasználás és adagolás




Használjon külön szórófejet az APESIN multi Quick & Easy-vel.



Adagolás az alkalma-zásnak megfelelően. Kérjük, az útmutatást figyelembe venni.



Ürítse ki a flakont egy napi használat után.

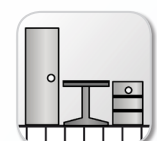

Felület fertőtlenítés / tisztítás: Fújja a habot a tiszta törölkendőre és egyenletesen törölje át a felületet.



Speciális fertőtlenítés: Ajánlott minden fokozott higiénia igénylő területen.



Szaniterek fertőtlenítése: Fújja a habot a tiszta törölkendőre és egyenletesen törölje át a felületet.



Szaniterek tisztítása: a lerakódott vízkő eltávolításához használja a Quick & Easy SANET daily terméket a fertőtlenítés előtt.

Felhasználási terület

- Az APESIN multi Quick & Easy használható minden kemény felületen.
- Sokoldalú, minden vízálló felületen alkalmazható az intézményi területen, pl. nyilvános létesítmények, irodák, tornatermek.
- Alkalmos ápolási létesítményekben, orvosi rendelőkben és idősok otthonában is.
- Az olyan egészségügyi területeken, ahol vízközdő eltávolítása szükséges, használjon előtte pl. SANET napi Quick & Easy-t, amely különösen alkalmas a vízkő, mészsó eltávolítására, és kellemes citrom illatot hagy maga után.
- Nagyfokú anyagösszeférhetőség jellemzi, pl. PMMA / Polimetil-metakrilát, Plexiüveg 8N, POM/polioximetilén Hostaform C 9021, 13021 típus.
- Kiváló anyag kompatibilitás galvanizált felületeken, mint króm, rozsdamentes acél, sárgaréz, valamint üveg felületek.

Alkalmazás

- Használjon külön szórófejet az APESIN termékekhez és matricát ezek a megkülönböztetéshez.
- Fújja a habot a törölkendőre és alaposan törölje át vele a felületet.
- Kellően nedvesítse be a törölkendőt az APESIN multi Quick & Easy termékkel annak érdekében, hogy a felület egyenletes benedvesítése garantált legyen.
- Hagyja hatni legalább 1 percig a terméket.
- Javasoljuk, hogy ürítse ki a vizet a munkanap befejezése után, és töltsen fel a flakont friss vízzel a következő használat előtt.
- Részletes információk a következő oldalon találhatóak: termék fertőtlenítő hatása, tevékenységi spektruma.

Összetevők

Tartalom 100g-ban: 2,45g DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, <5% Nem ionos felületaktív anyagok

Fenntartható fejlesztés és gyártás



Termékbiztonság, Tárolás és Környezetvédelem

Biztonság: Ipari felhasználásra készült termék. Részletes információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz. Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót.


Tárolás: Csak eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten tárolja. Fagyra érzékeny.

Környezetvédelem: A göngyöleget csak teljesen kiürített állapotban lehet a kijelölt gyűjtőhelyen leadni.

Kiszerezési egység
Cikkszám: 714319 6 x 325 ml

Az Ön partnere:
pH-érték


APESIN multi

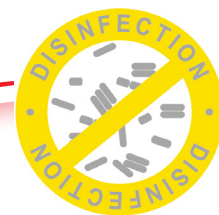**QUICK
& EASY**


Univerzális fertőtlenítő tisztítóhab

Az APESIN multi Quick & Easy fertőtlenítő hatása

		Hatóidő
Baktericid		
EN 1276	magas szerves terhelés	5 min.
EN 13727	magas szerves terhelés	1 min.
EN 13697 I&I	magas szerves terhelés	5 min.
EN 16615	magas szerves terhelés	1 min.
Penészölő		
EN 1650	magas szerves terhelés	5 min.
EN 13624	magas szerves terhelés	1 min.
EN 13697 I&I	magas szerves terhelés	15 min.
EN 16615	magas szerves terhelés	1 min.
Gombaölő		
EN 13624	magas szerves terhelés	30 min.
EN 16615	magas szerves terhelés	30 min.
Virucid		
EN 14476 hatékony a burkos vírusok ellen (HIV, HBV, HCV is)	magas szerves terhelés	1 min.
EN 14476 szelektíven virucid	magas szerves terhelés	30 min.
EN 14476 vaccinia vírus	magas szerves terhelés	1 min.
En 14476 adenovírus	magas szerves terhelés	30 min.
EN 14476 norovírus	magas szerves terhelés	5 min.
EN 14476 rotavírus	szerves terhelés nélkül	1 min.

		Hatóidő
VAH-listázott - baktericid és yeasticid aktivitás egészségügyi területen	mechanikus hatás erős szennyezettség	5 min.

A Quick & Easy rendszer automatikusan biztosítja a min. 10% (v/v) oldatot a termék koncentrátumból.

